

TECHNISCHE DATEN

ProfiSoftComfort

Klassifizierung:	Medizinprodukt der Klasse I (gemäß der Richtlinie 93/42/EWG)
Klimatische Bedingungen:	Umgebungstemperatur von 10° bis 40° C Luftfeuchtigkeit von 20% bis 75%
Gewährleistung:	24 Monate

Matratze

Abmessungen (B/L/H):	90 x 200 x 15 cm 100 x 200 x 15 cm Sondermaße auf Anfrage
Zonen:	Formschnitt einseitig, Raumgewicht 40, Stauchhärte 25 Formschnitt beidseitig, Raumgewicht 40, Stauchhärte 37 Glatt, Raumgewicht 35, Stauchhärte 40
Gewicht:	ca. 8 kg (90 x 200 x 15 cm) ca. 9 kg (100 x 200 x 15 cm)

Zulässiges Patientengewicht:	von 30 kg bis 180 kg
Material:	Kaltschaum Polyether – Schaum Polyether - Schaum
Zertifikate:	Oekotex Standard 100

Bezug

Abmessungen:	für 90/100 x 200 x 15 cm
Material:	Polyurethan Bi-Stretch 175gr/qm
Zertifikate:	Oekotex Standard 100 – schwer entflammbar nach CRIB 5 Norm

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

	Waschtemperatur 90°
	Nicht bleichen
	Nicht bügeln
	Bei max. 60° trocknen
E	Nicht chemisch reinigen
CE	Dieses Produkt entspricht den wesentlichen Schutzanforderungen, die in den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte genannt sind.

Alle Teile und Daten unterliegen der ständigen Weiterentwicklung und können somit von den aufgeführten Angaben abweichen.



Geschäftsführer: Oliver Otte, Martin Herberg

Version 2.5 - SLK 07/2013

ProfiSoft
Comfort 150

GEBRAUCHSANWEISUNG

WICHTIGE INFORMATION

Die gelieferte Schaumstoffmatratze wurde für den Versand komprimiert. Nach dem Auspacken benötigt die Matratze eine gewisse Zeit, um sich wieder in die ursprüngliche Form auszudehnen. Daher sollte die Matratze vor der Benutzung einige Stunden ohne Belastung in waagerechter Position liegen. Die Matratze kann dann wieder wie gewohnt eingesetzt werden.

Maße in cm (B / L / H):

	90	x	200	x	15
	100	x	200	x	15
		x		x	

SLK Vertriebsgesellschaft mbH

Lindenhorster Str. 38-40 · D-44147 Dortmund

Telefon: +49(0)231 – 925360 – 0

Telefax: +49(0)231 – 925360 – 29

Email: info@slk-gmbh.de

Internet: www.slk-gmbh.de

Hilfsmittelnummer: 11.29.05.1034



INDIKATIONEN

Die ProfiSoftComfort 150 findet aufgrund ihres Aufbaus und ihrer Wirkungsweise Anwendung in der Dekubitusprophylaxe und -therapie bis Stadium III nach EPUAP. Durch die Auflagedruckreduktion können liegebedingte Schmerzen reduziert werden. Der hochwertige, profilierte Kaltschaum unterstützt die Wirbelsäule und sorgt für optimalen Liegekomfort. Der wasserdichte, atmungsaktive Bi-Stretch-Bezug ist wasserundurchlässig und waschbar. Das System ist für ein Körpergewicht von 20 bis 180 kg geeignet.

WIRKUNGSWEISE

Durch die profilierten Schichten von unterschiedlichen hochwertigen Schaumstoffen wird eine optimale Druckentlastung der Auflagefläche an den Körper und die jeweilige Liegeposition erreicht, der Auflagedruck wird dadurch minimiert. Erreicht wird dies durch die spezifischen Eigenschaften des verwendeten Materials: Kaltschaum gewährleistet hohen Sitz-, Liege- und Schlafkomfort und besitzt eine ausgesprochen gute Anpassungsfähigkeit an Körper und Lattenroste. Dies hat zur Folge, dass die Matratze an allen gefährdeten Körperzonen eine Reduzierung des Auflagedruckes sicherstellt. Zusätzlich hat die Matratze spezielle Belüftungskanäle, um einem Wärme- und Feuchtigkeitsstau entgegen zu wirken.

WICHTIGE HINWEISE ZUM EINSATZ

Das System ProfiSoftComfort eignet sich zur Nutzung auf Pflegebetten und Standardbetten. Einstellungen am Bett können vorgenommen werden, ohne die

Funktionstüchtigkeit des Systems zu beeinträchtigen.

Die Matratze muss wie auf Abbildung 1 zu sehen ins Bett gelegt werden.

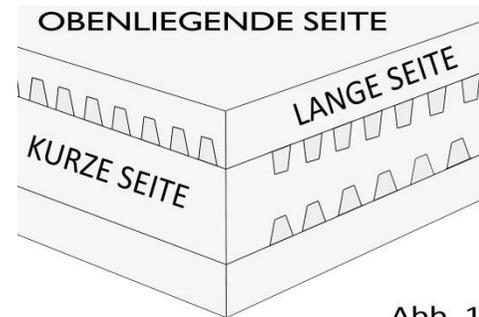


Abb. 1

Bei Verwendung des originalen SLK Inkontinenzbezuges ist die Seite, auf welcher der Patient liegt, durch die Beschriftung "Profi Soft Comfort" gekennzeichnet. Bei der Verwendung von Seitengittern an verstellbaren Betten für behinderte Menschen muss auf einen ausreichenden Abstand zwischen der Oberkante des Lagerungssystems und dem oberen Ende des Bettgitters geachtet werden (220 mm nach DIN 1970:2000). **Im Bedarfsfall sollten entsprechende Seitengittererhöhungen zum Schutz des Patienten angebracht werden.**

ANWENDUNGSRISEN UND KONTRAINDIKATIONEN

Allergien

Die Matratzen dürfen nicht bei einer bestehenden Schaumstoffallergie eingesetzt werden.

Inkontinenz

Da Schaumstoff ein extrem saugfähiges und Flüssigkeit speicherndes Material ist, sollte bei vorliegender Inkontinenz immer ein flüssigkeitsundurchlässiger, jedoch gleichzeitig atmungsaktiver Bezug eingesetzt werden. Die Matratze wird standardmäßig mit einem geschlossenen Inkontinenzschutzbezug ausgeliefert.

Dieser Bezug ist nicht nur wasserdicht und atmungsaktiv, sondern zusätzlich auch noch antimikrobiell ausgestattet. Der Bezug kann jederzeit abgenommen und gewaschen werden (bei 60°C – 90°C). Siehe hierzu auch die folgenden Reinigungshinweise, sowie die am Bezug angebrachten Waschanleitungen.

REINIGUNG

Da das Reinigen von kompletten Matratzen im Allgemeinen schwierig ist, wird die Matratze standardmäßig mit einem geschlossen Inkontinenzschutzbezug, mit verdecktem Reißverschluss, ausgeliefert. Ein Verschmutzen des Kerns kann somit verhindert werden. Der Inkontinenzschutzbezug ist bei 60-90°C waschbar, und mit üblichen Desinfektionsmitteln behandelbar. Es ist darauf zu achten, dass das System von außen gut kenntlich gemacht und ein entsprechendes Anschreiben (gut sichtbar) beigefügt wird. Ein Hygieneplan (Merkblatt) über die Reinigung der SLK-Produkte kann in unserer Servicestation in Dortmund angefordert werden. Detaillierte Informationen zur Reinigung und Wiederaufbereitung des SLK-Systems erhalten Sie im SLK-Hygiene Center. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder unsere Servicestation in Dortmund.

WARTUNGS- UND PFLEGEARBEITEN DURCH DEN ANWENDER

Es müssen keine Wartungs- und Pflegearbeiten durch den Anwender durchgeführt werden.