

TECHNISCHE DATEN

ViscoCareComfort

Klassifizierung: Medizinprodukt der Klasse I
(gemäß der Richtlinie
93/42/EWG)

Klimatische
Bedingungen: Umgebungstemperatur von
10° bis 40° C
Luftfeuchtigkeit von 20% bis
75%

Gewährleistung: 24 Monate

Matratze

Abmessungen (B/L/H): 90 x 200 x 15 cm

100 x 200 x 15 cm

Sondermaße auf Anfrage

Gewicht: ca. 9 kg (90 x 200 x 15 cm)
ca. 10 kg (100 x 200 x 15 cm)

Zulässiges

Patientengewicht: von 30 bis 200 kg

Material: Viskoelastischer Schaumstoff
Polyether-Schaumstoff

Zertifikate: Oekotex Standard 100

Bezug

Abmessungen: für 90/100 x 200 x 15 cm

Material: Polyurethan (PU) Bi-Stretch
175 gr/qm

Zertifikate: Oekotex Standard 100 –
schwer entflammbar nach CRIB
5 Norm

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

	Waschtemperatur 90°
	Nicht bleichen
	Nicht bügeln
	Bei max. 60° trocknen
	Nicht chemisch reinigen
	Dieses Produkt entspricht den wesentlichen Schutzanforderungen, die in den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte genannt sind.

Alle Teile und Daten unterliegen der ständigen
Weiterentwicklung und können somit von den
aufgeführten Angaben abweichen.



Geschäftsführer: Oliver Otte, Martin Herberg

Version 2.3 - SLK 07/2013

ViscoCare[®]
Comfort 150

GEBRAUCHSANWEISUNG

WICHTIGE INFORMATION

Die gelieferte Schaumstoffmatratze wurde für den
Versand komprimiert. Nach dem Auspacken benötigt
die Matratze eine gewisse Zeit, um sich wieder in die
ursprüngliche Form auszudehnen. Daher sollte die
Matratze vor der Benutzung einige Stunden ohne
Belastung in waagerechter Position liegen. Die
Matratze kann dann wieder wie gewohnt eingesetzt
werden.

Maße in cm (B / L / H):

	90	x	200	x	15
	100	x	200	x	15
		x		x	

SLK Vertriebsgesellschaft mbH

Lindenhorster Str. 38-40 · 44147 Dortmund

GERMANY

Telefon: +49(0)231 – 925360 – 0

Telefax: +49(0)231 – 925360 – 29

Email: info@slk-gmbh.de

Internet: www.slk-gmbh.de

Hilfsmittelnummer: 11.29.05.1033



INDIKATIONEN

Die ViscoCareComfort 150 findet aufgrund ihres Aufbaus und ihrer Wirkungsweise Anwendung in der Dekubitusprophylaxe und -therapie bis Stadium II nach EPUAP. Durch die Auflagedruckreduktion können liegebedingte Schmerzen reduziert werden. Der hautfreundliche, atmungsaktive Bi-Stretch-Bezug ist wasserundurchlässig und waschbar. Das System ist für ein Körpergewicht bis 200 kg geeignet.

WIRKUNGSWEISE

Die viscoelastische Oberfläche der Matratze sorgt für eine optimale Anpassung der Auflagefläche an den Körper und die jeweilige Liegeposition. Erreicht wird dies durch die spezifischen Eigenschaften des verwendeten Materials. Viscoelastische Schaumstoffe reagieren auf das aufliegende Gewicht und auf die Umgebungstemperatur. Durch die Körperwärme wird der Schaumstoff weicher und anschmiegsamer, ohne seine Elastizität zu verlieren. Dies hat zur Folge, dass die Matratze an den Auflagepunkten weicher ist als an den umliegenden Stellen. Dadurch passt sich die Matratze im Bereich der Kontaktfläche optimal an. So kann das Körpergewicht auf eine größtmögliche Fläche verteilt werden, wodurch der Auflagedruck minimiert wird. Ein Durchliegen der Matratze wird durch eine Stützschiene aus PUR-Schaumstoff auf der Unterseite verhindert. Zusätzlich besitzt die Matratze eine Klimaprofilierung in einer 3-Zonen-Anordnung um einem Wärme- und Feuchtigkeitsstau entgegenzuwirken.

WICHTIGE HINWEISE ZUM EINSATZ

Das System ViscoCareComfort eignet sich zur Nutzung auf Pflgebetten und Standardbetten. Einstellungen am Bett können vorgenommen werden, ohne die Funktionstüchtigkeit des Systems zu beeinträchtigen. Beim Einlegen ins Bett muss darauf geachtet werden, dass die Matratze mit der viscoelastischen Seite nach oben ins Bett gelegt wird. Bei Verwendung des originalen SLK Inkontinenzbezuges ist die Seite, auf welcher der Patient liegt, durch die Beschriftung "Visco Care Comfort" gekennzeichnet. Bei der Verwendung von Seitengittern an verstellbaren Betten für behinderte Menschen muss auf einen ausreichenden Abstand zwischen der Oberkante des Lagerungssystems und dem oberen Ende des Bettgitters geachtet werden (220 mm nach DIN 1970:2000). **Im Bedarfsfall sollten entsprechende Seitengittererhöhungen zum Schutz des Patienten angebracht werden.**

ANWENDUNGSRISIKEN UND KONTRAINDIKATIONEN

Allergien

Die Matratzen dürfen nicht bei einer bestehenden Schaumstoffallergie eingesetzt werden.

Inkontinenz

Da Schaumstoff ein extrem saugfähiges und Flüssigkeiten speicherndes Material ist, sollte bei vorliegender Inkontinenz immer ein flüssigkeitsundurchlässiger, jedoch gleichzeitig atmungsaktiver Bezug eingesetzt werden. Die Matratze wird standardmäßig mit einem geschlossenen Inkontinenzschutzbezug ausgeliefert. Dieser Bezug ist nicht nur wasserdicht und

atmungsaktiv, sondern zusätzlich auch noch antimikrobiell ausgestattet. Der Bezug kann jederzeit abgenommen und gewaschen werden (bei 60°C – 90°C). Siehe hierzu auch die aufgeführten Reinigungshinweise und die am Bezug angebrachten Waschanleitungen.

REINIGUNG

Da sich das Reinigen von kompletten Matratzen im Allgemeinen sehr schwierig gestaltet, wird die Matratze standardmäßig mit einem geschlossenen Inkontinenzschutzbezug und/oder verdecktem Reißverschluss ausgeliefert. Ein Verschmutzen des Kerns kann somit verhindert werden. Der Inkontinenzschutzbezug ist bei 60-90°C waschbar, und mit üblichen Desinfektionsmitteln behandelbar. Es ist darauf zu achten, dass das System von außen gut kenntlich gemacht und ein entsprechendes Anschreiben (gut sichtbar) beigefügt wird. Ein Hygieneplan (Merkblatt) über die Reinigung der SLK-Produkte kann in unserer Servicestation in Dortmund angefordert werden. Detaillierte Informationen zur Reinigung und Wiederaufbereitung des SLK-Systems erhalten Sie im SLK-Hygiene Center. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder unsere Servicestation in Dortmund.

WARTUNGS- UND PFLEGEARBEITEN DURCH DEN ANWENDER

Es müssen keine Wartungs- und Pflegearbeiten durch den Anwender durchgeführt werden.